



VIDEO

Perfit

vatech

Perfit FS

EL PRIMER BLOQUE DE ZIRCONIO
TOTALMENTE SINTERIZADO DEL MUNDO.


vatech

Paseo de la Reforma 389 Piso 16, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc C.P 06500, Ciudad de México

T. +52 1 (55) 6585-2395



W. www.vatechmexico.com

E. contacto@vatechmexico.com

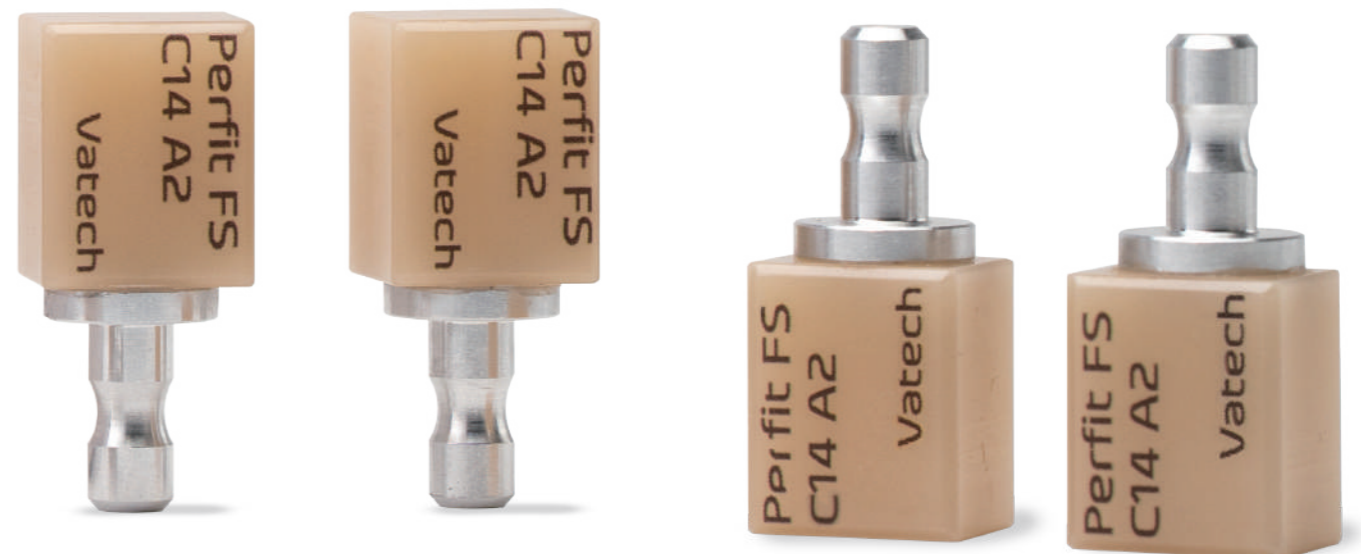

Máxima naturalidad

La estructura de 3 capas sin fisuras

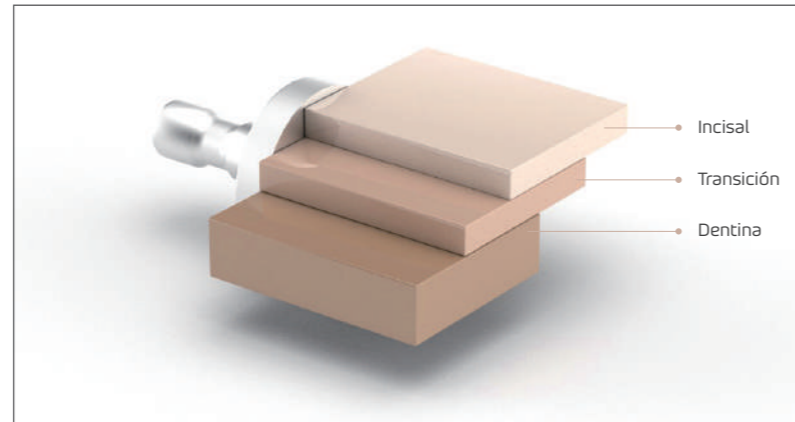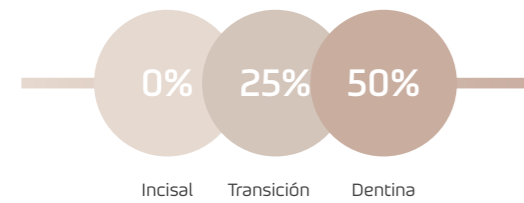

Flujo de trabajo rápido


Ahorra tiempo, ya que no requiere cocción



Alto nivel de resistencia al agrietamiento


Después de la prueba de resistencia a la indentación Vickers, con una carga de 10 kg.

En comparación con el disco de zirconia general convencional (3Y-TZP) y la vitrocerámica de vidrio, Perfit FS no muestra grietas aparentes que emanen de las esquinas de la hendidura de diamante, lo que indica su excepcional resistencia a la fractura de la indentación de diamante. En conclusión, las restauraciones de Perfit FS presentan una mayor resistencia a la flexión que otros tipos de restauraciones que se muestran a continuación.

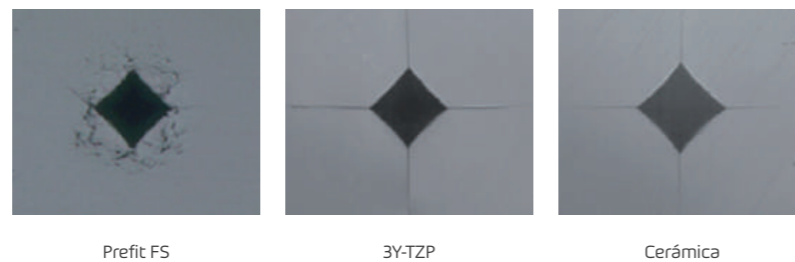

500 MPa, Alta resistencia a la flexión

Amplia gama de indicaciones

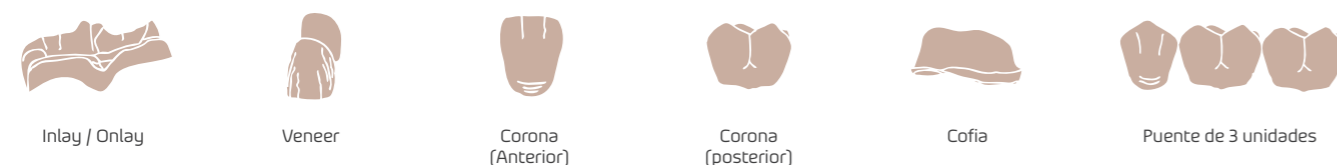

Preguntas Frecuentes


Q ¿Perfit FS está hecho de zirconia?
A Sí. Este producto está hecho de 100% zirconia.

Q ¿Los bloques de Perfit FS requieren de un proceso de cocción?
A No es necesaria la cocción, ya que los bloques de Perfit FS son totalmente sinterizados.

Q ¿Cuántos tamaños hay disponibles?

A Perfit FS está disponible en 4 tamaños:

- I12 (15.0 X 12.0 X 10.4)
- C14 (18.0 X 14.0 X 12.7)
- C16 (18.0 X 15.9 X 17.8)
- B32 (32.0 X 15.1 X 15.1)

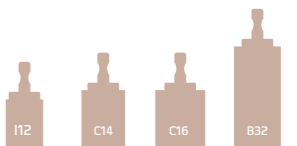

Q ¿Qué fresadoras son compatibles con Perfit FS?

A Fresadoras en húmedo de 4 o 5 ejes que puedan fresar bloques de vitrocerámica.
 *Antes de utilizar Perfit FS, se necesita que el soporte técnico de su fresadora compruebe la técnica de fresado, incluyendo la herramienta y el sistema CAM.

Q Fresadoras disponibles

Fresadora	S/W	Vida útil de la herramienta
Imes-icore - CORITEC One/One+ - CORITEC 150i pro	Millbox hyperDENT	Más de 20 unidades (Fresa personalizada para Perfit)
Dentsply Sirona - CEREC MC X - CEREC MC XL - CEREC Primemill - inLab MC XL	inLab S/W Cerec SW	25 bloques (Fresa puntiaguda) 12 bloques (Fresa escalonada)
Roland DG - DXW-42W	MillBox	Más de 20 unidades (Fresa personalizada para Perfit)

Q ¿Es posible teñir Perfit FS?

A Perfit FS se puede teñir y glasear utilizando varios fabricantes.

Q ¿Es posible pulir la superficie de Perfit FS?

A No se recomienda el pulido de alto brillo ya que puede disminuir la resistencia y estética en comparación con el glaseado.

